

口腔用スポンジ

ケアポンジ



紙軸

- 細かな凹凸が汚れをキャッチ
- 平らな面で舌の汚れも取りやすい

- 持ち運びにも便利な個包装で衛生的




歯の表面
歯ぐき・すきま
舌の汚れ
これ1本でスッキリ!



使用方法

上あごから下あごへ、奥から手前の順番で清掃します。

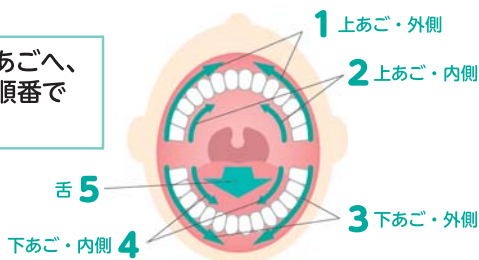

- スポンジを回転させたり、前後上下に動かし、歯茎の外側の汚れを取り除きます。
- スポンジを前後上下に動かしながら、歯の内側をきれいにします。
- スポンジの平らな部分で、舌の中央からやさしくかきだします。



品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
007-70198	ケアポンジ 60本	オープン	24箱	4971089701989
007-70199	ケアポンジ 300本 (50本×6袋)	オープン	6箱	4971089701996



やさしい目で健康を見つめる...

イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<http://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<http://www.iwatsukishop.jp/>

