

# イワツキ 透湿尿とりパッド 吸速

医療費控除対象品



一気に排尿する方、お肌の弱い方に



全体吸収量 1400cc

## 瞬間ドライ吸収

瞬間吸収シートとスピード拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収！一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。



## 横モレ防止

パッドを広げただけで、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。

ひろびろ設計

## あてやすい



体の中心に合わせやすいセンターライン入り。

## ムレ解消

### 透湿性バックシート

尿を通さず湿気だけを放出。カブレやムレの不快感を解消！



<通気性実験写真>



## 透湿尿とりパッド吸速ビッグ価格表


品番	商品名	製品サイズ (cm)	入数	ケース 入数	巾×高×奥行(mm)		参考価格 (税抜)	JANコード
					袋	重量		
005-50287	透湿尿とりパッド 吸速 ビッグ	31×60.5	30枚	4袋	350×245×190	2,359g	オープン	 4 971089 502876
					725×263×395	10.4kg		



紙おむつのあて方  
尿モレ防止のワンポイントアドバイス



【ハイドライエース簡単テープ止めタイプ】  
+ 【イワツキ 透湿尿とりパッド】 併用の場合

テープ止めのギャザーはパッドを併用する事を前提として考えられていますので、広く作られています。  
立体ギャザーの中に必ずパッドを収めて下さい。  
ギャザーは非常に強い撥水をしませす。ギャザーの立ち具合や重なりが、モレ防止に大きく関係しますので、ギャザーチェックをしてください。  
高吸収パッドは大型な物が多いので、パッドの後部がテープ止めの後ろからはみ出さない様に注意して下さい。  
場合によっては外側に折り返しを行なうと効果的です。

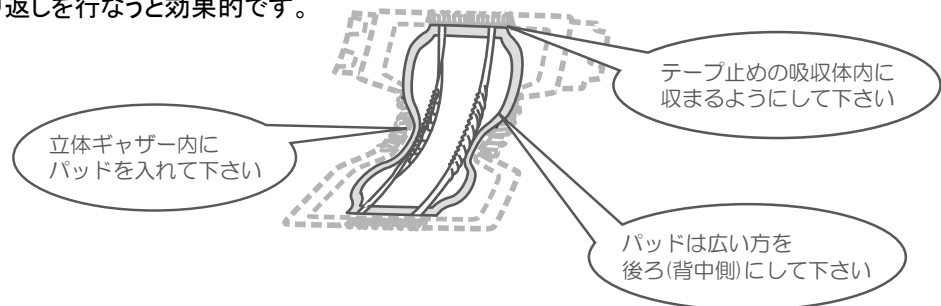

### 『医療費控除制度』活用のおすすめ

- 大人用紙おむつや尿とりパッド類は「医療費控除」の対象品となっています。
- 「医療費控除」申告の必要書類
  - 「おむつ使用証明書」  
おむつを使う方を診ているかかりつけのお医者さんか、病院にご相談のうえ「紙おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
  - 「領収書」  
紙おむつを購入した(日付)(購入金額)(使う方の氏名)(商品名又は大人用紙おむつ)が記入された「領収書」を必ず受け取り、申告の時まで保存しておいて下さい。
- 申告しなければ、税金の還付は受けられません。毎年2～3月の確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収書」を添えて必ず申告しましょう。
- 詳しくは税務署、市区町村におたずね下さい。

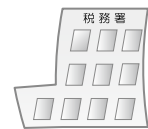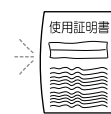

やさしい目で健康を見つめる...

**イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<http://www.iwatsuki.co.jp>