



# 口腔用スポンジ ケアポンジ®

歯ぐき・すきま  
舌の汚れ  
これ1本でスッキリ!



細かな凹凸が  
汚れをキャッチ

紙軸

星型カットが  
汚れをキャッチ

プラ軸

平らな面で舌の  
汚れも取りやすい

きめ細かで弾力  
のあるスポンジ




持ち運びにも便利な個包装で衛生的



## 使用方法

上あごから下あごへ、  
奥から手前の順番で  
清掃します。

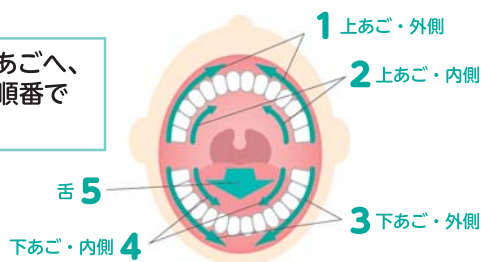

● スポンジを水で湿らせてから  
使います。誤嚥を防ぐため、  
水気をよくしぼります。

● スポンジを上下左右に  
動かしながらお口の中  
の汚れをかき出します。



品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
007-70198	ケアポンジ® 紙軸 60本	オープン	24箱	4971089701989
007-70199	ケアポンジ® 紙軸 300本(50本×6袋)	オープン	6箱	4971089701996
007-70217	ケアポンジ® H プラ軸 300本(50本×6袋)	オープン	6箱	4971089702177



やさしい目で健康を見つめる...

**イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18  
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢  
<https://www.iwatsuk.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)  
<https://www.iwatsukishop.jp>

