



IWATSUKI MEDICAL SUPPORT

イワツキメディカルサポート

ディスポ製品シリーズ

プラスチックエプロン

血液・体液などから医療従事者を守ります。



用途

『患者と接する場合や、血液・体液等に触れる可能性があるときに使用します。』

- 血液付着物取扱い時
- 血液・汚物取扱い時
- 患者処置時
- シーツ交換時
- 配膳時
- 面会者入室用

Standard Precautions

—標準予防策—

血液・体液・分泌物・排泄物等は、病原体が未同定で、感染の危険があるものとして取り扱う。

特長

- 優れたバリアー性。血液・体液等が衣服に浸透しません。
- ポリエチレン素材。焼却が可能です。
- 豊富なカラー。用途・部署別での使い分けができます。
- ロングタイプ(72×120cm)。ひざ下までカバーできます。
- 取り出し口が下部にあるので、落下菌を防ぎます。

※ 個人防御具用ホルダーもございます。
詳しくは弊社セールスまでお問合せ
ください。



装着イメージ

品番	品名	規格	参考価格	ケース入数	JANコード
004-41390	プラスチックエプロン	ピンク 100枚	オープン	8箱	4971089413905
004-41391	プラスチックエプロン	ホワイト 100枚	オープン	8箱	4971089413912
004-41392	プラスチックエプロン	ブルー 100枚	オープン	8箱	4971089413929
004-41393	プラスチックエプロン	グリーン 100枚	オープン	8箱	4971089413936

着脱手順

<着方>



① 箱から1枚ずつ取り出します。



② 二つ折りの状態まで広げます。



③ 折り目の山側を自分側に向け、首の部分をもってそっとかぶり、広げます。



④ 腰ひもを後ろで結びます。



装着完了

エプロンの前面を無菌に近い状態で展開し、装着できます。

<外し方>



① 首にかけたひもの部分を強く引いて切ってください。(ミシン目が入っています)



②③ 外側の面が内側になるように腰ひもの高さまで折りこみます。



④ 後ろの腰ひもを切ります。



⑤⑥ コンパクトにたたみ、廃棄してください。

* 医療機関では感染性廃棄物として廃棄してください。



やさしい目で健康を見つめる...

イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuk.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp>

