



# イワツキメディカルサポート

ディスポ製品シリーズ

## メディカルシート

検診台、手術台のディスポシートとして  
内視鏡室や手術室の汚染防止や感染防止に



使用例：内視鏡検査台

### 【すべり止め加工】

シートの上で動いてもズレにくい！

### 【80cm幅】

一般的な検診台や手術台の幅にフィット！

### 【カールしにくい素材】

### 【#8012WR/#8020WR】

120cm・200cmごとにミシン目が入っているため、素早くカットできます。

### 【#8050WR】

ロールタイプなので好みの長さにカットできます！

## メディカルシートR 専用ホルダー

- ◆「メディカルシート専用ホルダー」を使用することで設置が素早く、簡単にできます。また、衛生的に保管ができます。『ベルトタイプ』と『磁石タイプ』が選べます。※詳細は弊社セールスマンまでお問い合わせください。

《ベルト付タイプ》



《磁石付タイプ》



品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
004-41611	メディカルシート #8050WR 白 80cmx50m 滑り止	オープン	4本	4971089416111
004-41613	メディカルシート #8012WR 白 80cmx60m 滑り止 50回 (ミシン目120cm)	オープン	4本	4971089416135
004-41823	メディカルシート #8012TW 白 80cmx120cm 滑り止め 10枚	オープン	20袋	4971089418238
004-41806	メディカルシート #8020WR 白 80cmx60m 滑り止 30回 (ミシン目200cm)	オープン	3本	4971089418061
004-41901	メディカルシート #8021TW 白 80cmx210cm 滑り止め 10枚	オープン	10袋	4971089419013
004-41654	メディカルシートR 専用ホルダー 青 ベルト付タイプ	—	—	—
004-41698	メディカルシートR 専用ホルダー 青 磁石付タイプ	—	—	—

やさしい目で健康を見つける...



**イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18  
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢  
<https://www.iwatsuk.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)  
<https://www.iwatsukishop.jp>



## メディカルシートR 専用ホルダー取扱い説明書

### I.ホルダーの設置手順


- ①使用部位(上部、下部)に近い側にホルダーを設置します。  
※使用者から設置位置の指定がある場合もあります。
- ②ベッドにホルダーのベルトを引っ掛けて固定します。



- ③ベッドとホルダーの間に隙間ができないようにします。
- ④ホルダーをベッドの端と平行に設置してください。  
※ホルダーの位置がベッドの奥だとシートが擦れて取出しにくくなります。

### III.シートの敷き方

- ①シートを垂直に引き上げてください。  
※ベッド方向に急角度でシートを引っ張り出すと、シートが滑止め加工のため、取り出しにくくなります。

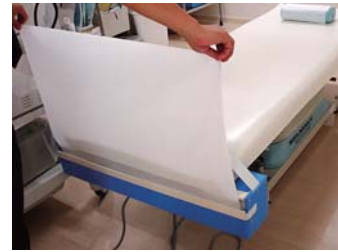

- ②シートをカットして使用してください。  
#8050・・・シートを引っ張り出して、必要な分をベッドに敷いて、ハサミ等でカットしてください。  
#8012・・・シートを引っ張り出して、ミシン目部分を  
#8020 カットしてください。



### II.シートのセット手順


- ①ホルダーの蓋を開けて、芯棒を取出し、芯棒をシートに通します。



- ②芯棒をシートに通して、片側約1cm芯棒を出しておきます。



- ③ホルダー内側の溝に芯棒(シート)をセットします。
- ④ホルダー両面のマジックテープで蓋を閉じてください。

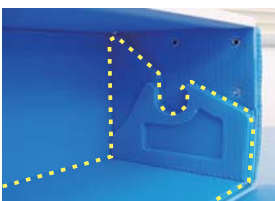

- ▲ 注意 ホルダーを縦付けする場合には、ホルダー内側の受け台(黄色い点線の部分)を前後逆にしてください。

### IV.シートの交換

- ①ホルダーの蓋を外します。
- ②シート芯と芯棒を取り出します。
- ③“ I. ホルダー設置手順”でシートを交換してください。

#### ⚠ 取り扱い上の注意 ⚠

- ①ホルダーの落下事故防止のため、必ずご使用前にホルダー各部位の状態(ベルトやネジがゆるんでいないか、劣化や破損をしていないか等)をご確認ください。不具合があると思われる時は、直ちに弊社または納入業者様にご連絡ください。
- ②指定以外の商品や目的のご使用はお断りいたします。
- ③直射日光および火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。