



嘔吐物処理セット

救急用品




嘔吐物処理セットとは？

風邪やノロウイルスなど、嘔吐物はさまざまな病原体に汚染されていると考えられます。「嘔吐物処理セット」は個人防護具と汚物処理用品に加え「抗菌・消臭剤(SS-P3EX)」の強力抗菌・消臭効果で緊急時でも二次感染を予防し、安全に嘔吐物が処理できます。



セット内容

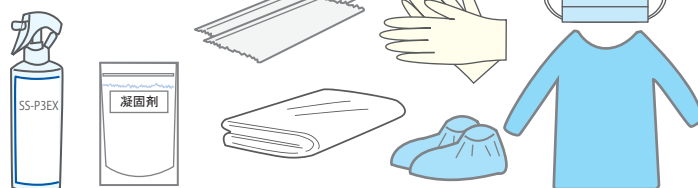

- 抗菌消臭剤(250ml)・・・ 1本
- 嘔吐物の凝固剤(35g)・・・ 1コ
- 使い捨て長袖エプロン・・・ 1枚
- 使い捨て医療マスク・・・ 1枚
- 使い捨て手袋M・L・・・ 各1双
- シューズカバー・・・ 1足
- ペーパータオル・・・ 10枚
- ポリ袋・・・ 2枚

【安全性】

複数の抗菌性アミノペプチドが主成分の強力抗菌・消臭剤(SS-P3EX)が、ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)やO-157を含む大腸菌等の不活化に効果があります。強い塩素臭や肌荒れ、色素脱色、金属腐食がないので、いつでも・どこでもご使用できます。

菌名	試験開始時	経過時間	結果
ネコカリシウイルス ※ノロウイルス代替	log TCID ₅₀ /ml 7.0	5分後	<3.5(検出せず)
O-157	3.1 × 10 ⁶	1分後	検出せず
大腸菌	2.7 × 10 ⁶	1分後	検出せず
MRSA	2.1 × 10 ⁶	1分後	検出せず

【充実した防護用品】

嘔吐物は想像以上に遠くまで飛散しています。医療材料メーカーならではの充実した個人防護具で、処理する方を汚染のリスクから守ります。

【スピーディな処理】

ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、嘔吐物等の処理は乾燥しないうちに迅速に行うことが重要です(厚生労働省)。

嘔吐物処理セットはすべての道具がセットになっているので、処理への対応が素早く行えます。

処理の手順も写真入説明書が入っているので、わかりやすくなっています。

品番	品名・規格	参考価格	ケース入数	JANコード
007-70096	嘔吐物処理セット	オープン	4箱	4971089700968
120-98027	SS-P3EX(抗菌消臭剤) 4L	オープン	3コ	4560169980279
120-009	SS-P3EX(抗菌消臭剤) 18L 業務用	オープン	1コ	4560169980286
120-020	凝固剤 35g入	オープン	20コ	4560169980200

※凝固剤は出荷単位がケースになります。 ※製品仕様及びデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。



やさしい目で健康を見つめる...

イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp>



嘔吐物 処理セット

セット内容

- ◆ 抗菌消臭剤 (250ml)
- ◆ 使い捨て長袖エプロン (1枚)
- ◆ 使い捨て医療用マスク (1枚)
- ◆ ペーパータオル (10枚)
- ◆ 嘔吐物の凝固剤 (35g)
- ◆ 使い捨て手袋 (M・L各1双)
- ◆ シューズカバー (1足)
- ◆ ポリ袋 (2枚)

- 嘔吐物以外に、下痢など糞便の処理にもご使用できます。
- ご使用前に必ず使用手順をよく読んで正しくお使いください。
- 処理終了後は、すべての内容品(スプレーボトル等)を廃棄してください。

使用手順



① 作業前には必ずエプロン・手袋・マスク・シューズカバーを身に付けてください。事前に、抗菌消臭剤のストッパーを解除してください。

② ペーパータオル・ポリ袋を出し、ポリ袋の口は2枚とも広げてすぐに使えるよう準備してください。また、嘔吐物を回収する際に使う、ヘラ・ちり取りを箱から切り取ってください。



③ 嘔吐物全体に凝固剤をまんべんなくふりかけ固めます。凝固剤は100~200倍の吸収力がありますので嘔吐物の量に応じて使用量を調節してください。



④ 次に抗菌消臭剤を嘔吐物全体に行渡るようスプレーします。1回の嘔吐に対してボトル半分~2/3位がご使用の目安です。嘔吐物の水気がなくなり完全に固まるまで待ちます。



⑤ 固まった嘔吐物はヘラ・ちり取りを使って外側から内側に向けて静かに回収します。



⑥ 回収した嘔吐物とヘラ・ちり取りをポリ袋に入れ、(この時上から抗菌消臭剤をスプレーすると効果的)袋の口をしっかりと結びます。口を閉じた袋はもう1枚の袋に入れます。



⑦ 嘔吐物が付着していた床とその周囲をペーパータオルで覆い、上から抗菌消臭剤をまんべんなくスプレーします。



⑧ 約5分間浸した後、床に残った嘔吐物をペーパータオルでふき取って、ポリ袋に捨ててください。




⑨ その後嘔吐物のあった場所から半径1mほどの範囲で抗菌消臭剤をスプレーしてください。



⑩ 処理後は使用していたシューズカバー⇒手袋⇒エプロン⇒マスクの順番に外して袋へいれます。
※手袋の外し方:汚物が飛散しないよう、包み込むように裏返してははずします。



⑪ 廃棄物が入った袋に上から抗菌消臭剤を十分にスプレーしてください。その後、しっかりと袋を結びます。

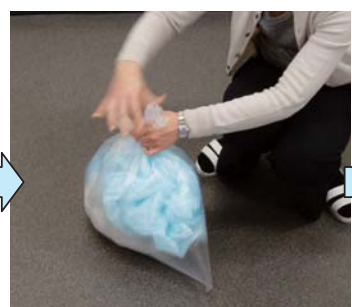

⑫ 全ての処理が終わったら石鹸で手をしっかりと洗ってください。また、処理後十分に換気を行うことが感染の防止には重要です。

