

**2020年10月 (第6版)
*2018年10月 (第5版)

届出番号:13B3X00207000011

医4 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000
柄 付 ガ ー ゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ガーゼを重ねて縫製したものに柄を縫いつけたもの。
X線造影系を含んでいる。

ガーゼ及び柄：綿100%

**X線造影系：硫酸バリウム、ポリプロピレン、
色素 他

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器
官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構
造に適用することを目的とする。
X線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

手術時に適宜使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない場所に保管する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254