


# アイシールド



滑らかな表面で飛沫などを拭き取りやすい

## 血液や体液などの飛沫から眼を防護するアイシールド


- レンズの穴をフレームの突起に取り付けるだけで簡単に装着できます。
- 眼鏡との併用が可能です。

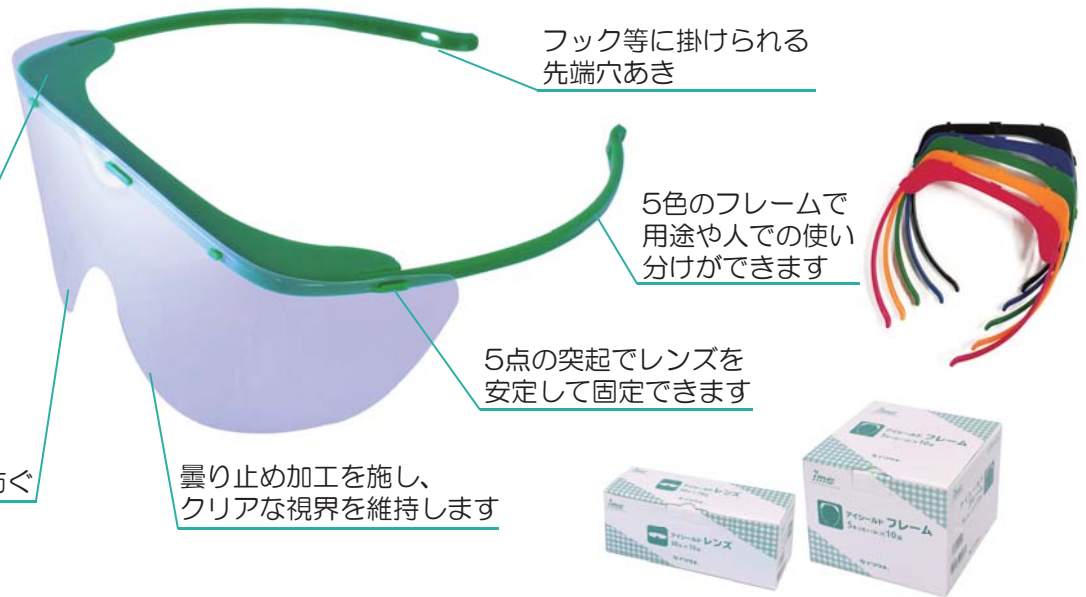

両面保護フィルム付きで、指紋の付着や傷を使用直前まで防ぐ


曇り止め加工を施し、クリアな視界を維持します

### 使用方法

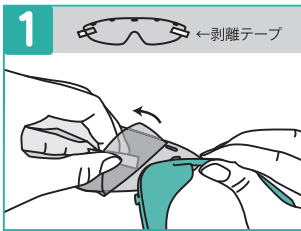


1 レンズ片面の剥離テープを持ち、保護フィルムを1つ目の穴まではがして、フレームの一番端の凸部に取り付けます。


\* レンズの両面に保護フィルムがついています。

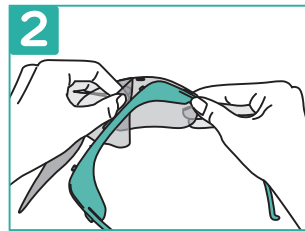

2 レンズの保護フィルムをはがした部分には触れないように注意してください。

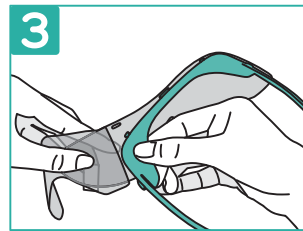

3 保護フィルムをはがしながら、フレームの凸部にレンズを取り付けます。

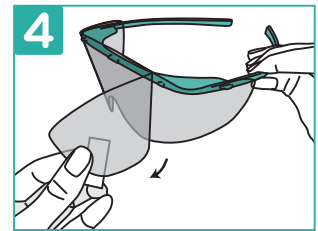

4 レンズの全ての穴をフレームに取り付けたら、外側の保護フィルムをはがします。

品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
004-42252	アイシールド フレーム 5本×10袋	オープン	8箱	4971089422525
004-42253	アイシールド レンズ 30枚×10袋	オープン	8箱	4971089422532



やさしい目で健康を見つめる...

## イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18  
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢  
<https://www.iwatsuki.co.jp>

**イワツキSHOP** (オンラインショップ)  
<https://www.iwatsukishop.jp>

