

# イワツキ 透湿尿とりパッド 吸速<sup>®</sup>

医療費控除対象品



一気に排尿する方、お肌の弱い方に



## しっかり立ち上がりソケイ部へフィット!

強力フィットギャザーでコツいらず! 誰でも簡単にあてやすく横モレを防ぎます。



イメージ図

素肌と同じ弱酸性素材

## 弱酸性素材の表面シート

繰り返し吸収しても、パッドの表面を素肌と同じ弱酸性に保ちます。



## ムレ軽減

透湿


透湿性シートがおむつ内の湿気を逃し、ムレを防ぎます。



<通気性実験写真>



## 瞬間ドライ吸収

瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収! 一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。

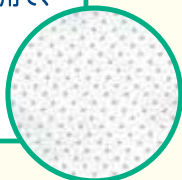

## あてやすい

体の中心にあわせやすいセンターライン入り。

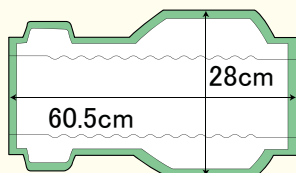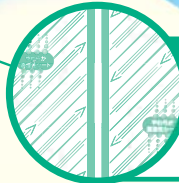

## 吸収回数の目安

1回の排尿量 150ml として 排尿 **7** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです



## 透湿尿とりパッド吸速®ビッグ価格表


品番	商品名	製品サイズ (cm)	入数	ケース 入数	巾×高×奥行(mm)		参考価格	JANコード
					袋	袋		
					ケース	ケース		
005-50312	透湿尿とりパッド 吸速®ビッグ	28×60.5	30枚	4袋	340×250×185	2,130g	オープン	4971089503125
					515×395×365	9.4kg		



紙おむつのあて方  
尿モレ防止のワンポイントアドバイス


【ハイドライエース簡単テープ止めタイプ】  
+ 【イワツキ 透湿尿とりパッド】併用の場合

テープ止めのギャザーはパッドを併用する事を前提として考えられていますので、広く作られています。  
立体ギャザーの中に必ずパッドを取めて下さい。  
ギャザーは非常に強い撥水をしませす。ギャザーの立ち具合や重なりが、モレ防止に大きく関係しますので、ギャザーチェックをしてください。  
高吸収パッドは大型な物が多いので、パッドの後部がテープ止めの後ろからはみ出さない様に注意して下さい。  
場合によっては外側に折り返しを行なうと効果的です。

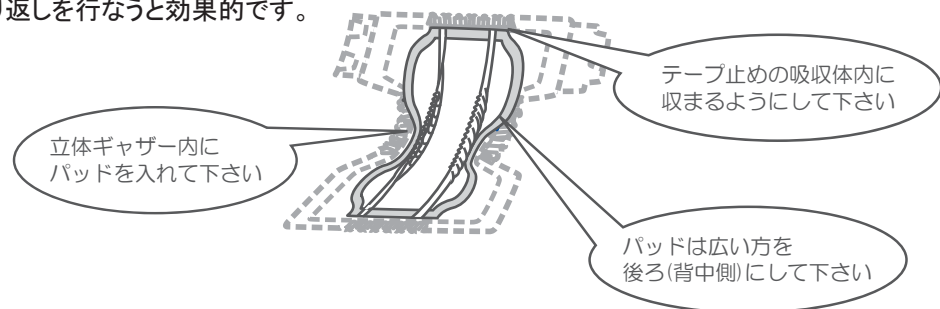

### 『医療費控除制度』活用のおすすめ

- 大人用紙おむつや尿とりパッド類は「医療費控除」の対象品となっています。
- 「医療費控除」申告の必要書類
  - 「おむつ使用証明書」  
おむつを使う方を診ているかかりつけのお医者さんか、病院にご相談のうえ「紙おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
  - 「領収書」  
紙おむつを購入した(日付)(購入金額)(使う方の氏名)(商品名又は大人用紙おむつ)が記入された「領収書」を必ず受け取り、申告の時まで保存しておいて下さい。
- 申告しなければ、税金の還付は受けられません。毎年2～3月の確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収書」を添えて必ず申告しましょう。
- 詳しくは税務署、市区町村におたずね下さい。

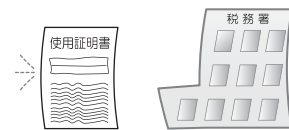

やさしい目で健康を見つめる…

**イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)  
<https://www.iwatsukishop.jp>

