

イワツキ 吸収・拡散パッド

医療費控除対象品



イワツキ ハイパーキャッチ

高い吸収性&優れた通気性の尿とりパッド

すぐにお肌サラサラ
すばやく尿を引き込む表面シートが排尿後すぐにパッド表面をサラサラにするので、排尿時の不快感を軽減します。

逆戻りを防いでべたつかない
独自の吸収体が尿をしっかり吸収して逆戻りを防ぐので、べたつきを軽減しサラサラ快適が続きます。

ムレ軽減でお肌にやさしい



弱酸性素材の表面シート
繰り返し吸収しても、パッドの表面を素肌と同じ弱酸性に保ちます。


素肌と同じ弱酸性素材

しっかり立ち上がりソケイ部へフィット!
強力フィットギャザーでコツいらず! 誰でも簡単にあてやすく横モレを防ぎます。




イメージ図

あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターライン入り。

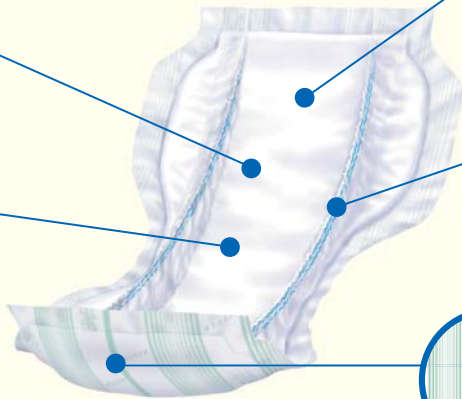


ハイパーキャッチ1600

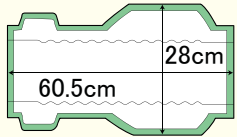

吸収回数目安
1回の排尿量 150ml として 排尿 **9** 回分
上記数値は当社測定方法によるものです



ハイパーキャッチ2000

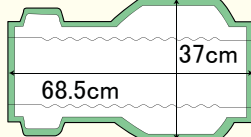

吸収回数目安
1回の排尿量 150ml として 排尿 **10** 回分
上記数値は当社測定方法によるものです



イワツキ 安心夜用パッド

長時間・夜間使用ができる尿とりパッド



超吸収ドライマット&スリット加工
ハイスピード吸収ポリマーとスリット加工により、吸収スピードがさらにUP! 大量の尿を素早く拡散させモラさず吸収し、表面をドライな状態に保ちます。

ムレ軽減でお肌にやさしい



お肌にやさしい表面シート
お肌のカブレを防止する天然植物成分を表面不織布にコート。お肌をやさしく守ります。

安心のハイ立体ギャザー
高さ5cmのモレ防止立体ギャザーが横モレを防ぎます。

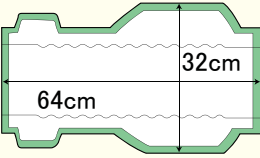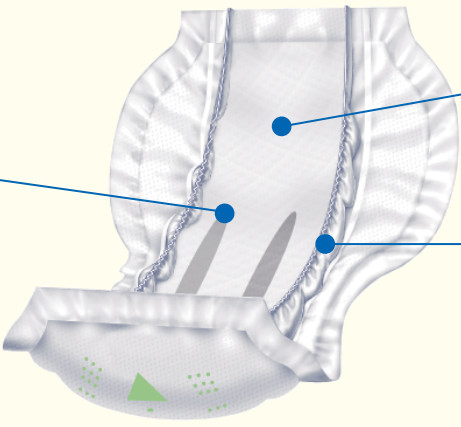

吸収回数目安
1回の排尿量 150ml として 排尿 **8** 回分
上記数値は当社測定方法によるものです



やさしい目で健康を見つめる...

吸収・拡散パッド価格表

| 品番 | 商品名 | 製品サイズ (cm) | 入数 | ケース 入数 | 巾×高×奥行(mm) | | 参考価格 | JANコード |
|-----------|----------------------------|---------------|-----|-----------|-------------|--------|------|---------------|
| | | | | | 袋 | 袋 | | |
| | | | | | ケース | ケース | | |
| 005-50313 | ハイパーキャッチ® 1600 病院施設用 | 28×60.5 | 30枚 | 4袋 | 340×250×185 | 2,370g | オープン | 4971089503132 |
| | | | | | 515×395×365 | 10.3kg | | |
| 005-50314 | ハイパーキャッチ® 2000 病院施設用 | 37×68.5 | 20枚 | 4袋 | 320×295×215 | 2,310g | オープン | 4971089503149 |
| | | | | | 625×305×445 | 10.3kg | | |
| 005-50283 | 安心夜用パッド 病院施設用 | 32×64 | 28枚 | 4袋 | 420×385×120 | 2,950g | オープン | 4971089502838 |
| | | | | | 465×405×445 | 12.9kg | | |



紙おむつのあて方
尿モレ防止のワンポイントアドバイス


【ハイドライエース簡単テープ止めタイプ】
+【イワツキ 吸収・拡散パッド】併用の場合

テープ止めのギャザーはパッドを併用する事を前提として考えられていますので、広く作られています。

立体ギャザーの中に必ずパッドを収めて下さい。



ギャザーは非常に強い撥水をします。ギャザーの立ち具合や重なりが、モレ防止に大きく関係しますので、ギャザーチェックをしてください。

高吸収パッドは大型な物が多いので、パッドの後部がテープ止めの後ろからはみ出さない様に注意して下さい。場合によっては外側に折り返しを行なうと効果的です。

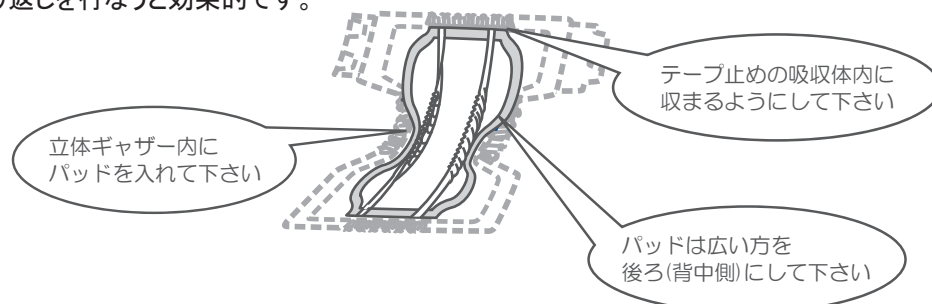

『医療費控除制度』活用のおすすめ

- 1) 大人用紙おむつや尿とりパッド類は「医療費控除」の対象品となっています。
- 2) 「医療費控除」申告の必要書類
 - イ) 「おむつ使用証明書」
おむつを使う方を診ているかかりつけのお医者さんか、病院にご相談のうえ「紙おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
 - ロ) 「領収書」
紙おむつを購入した(日付)(購入金額)(使う方の氏名)(商品名又は大人用紙おむつ)が記入された「領収書」を必ず受け取り、申告の時まで保存しておいて下さい。
- 3) 申告しなければ、税金の還付は受けられません。毎年2～3月の確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収書」を添えて必ず申告しましょう。
- 4) 詳しくは税務署、市区町村におたずね下さい。

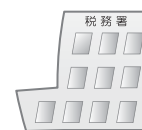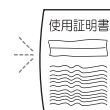

やさしい目で健康を見つめる...

イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp>

