

医4 整形用品
一般医療機器 ギブス包帯 33056000
ル ナ キ ャ ス ト

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエステル基布に熱可塑性ポリカプロラク톤を塗布した、ロール状のギブス包帯である。

*幅：S 5cm、M 7.5cm、L 10cm、LL 12.5cm

【使用目的又は効果】

骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定するために用いる。


【操作方法又は使用方法等】

本品は下巻なしでも使用できますが、通常は、チューブ包帯等の下巻を使用してください。


特に、取り外しにギブスカッターを使用する場合、本品を5層以上重ねる場合は下巻が必要です。

【使用方法】

- 1) 70℃以上のお湯を用意します。温度が高いとより速く軟化します。なお、電子レンジは使用できません。
- 2) 温度が70℃以上であることを確認し、帯を付けたまま本品をお湯に入れます。なお、使用する長さに応じて、事前に本品を裁断してもご使用できます。本品(ロール又はシート状)をお湯に入れて軟化させますが、お湯に入れる時間は約3分間が目安です。

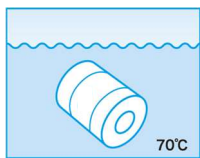

- 3) お湯から取り出します。お湯で熱くなっていますので、取り出す際は十分ご注意ください。
十分軟化させた本品を、鉗子等を使い、お湯を切りながら取り出します。乾いたタオル等で残りのお湯を良く拭き取ってください。タオルで包み込んで、上から押し出すように圧迫するとお湯がよく切れます。

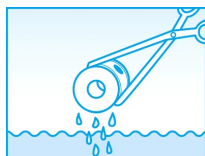

- 4) キャスティング：本品を包帯のように転がして折り目や皺がないように巻きます。強く引っ張り過ぎず2～3層巻いてください。強度が必要な場合は、更に重ねて巻くことで硬さを調節することができます。



完全に硬化するまで力を加えたり、動かしたりしないでください。硬化時間は約20分、歩く場合は約30分を目安にしてください。なお、巻き上げ時に本品が硬化したり、十分に軟化していない場合は、再度70℃以上のお湯につけてご使用ください。



5) 取り外し

本品はギブス剪刀で外すことができます。ただし5層以上の場合は、ギブスカッターで取り外してください。
なお、ギブスカッターで取り外す際は必ず下巻をご使用ください。



【使用上の注意】

- 患部に腫脹、感染創、潰瘍、発疹等ある患者には慎重に適用すること。
- 本品使用中に、痛み、しびれ、感覚麻痺、かゆみ等の症状が発生した場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 本品は50℃以上の環境、熱源のある場所で使用しないこと。
- 完全に硬化するまで、無理な力や体重をかけないこと。[本品が変形したり、けがを引き起こす恐れがあるため]
- ギブスカッターで取り外す場合は、下巻を使用すること。
- 本品装着中に、本品の破損及び著しい汚損が認められる場合には、新しい本品と交換すること。
- 本品は電子レンジを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

〈有効期間〉

製造日より3年[自己認証データによる]
箱表示の有効期限を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

お客様相談窓口 03-3966-8254