

# イワツキ 吸収・拡散パッド

医療費控除対象品



## イワツキ ハイパーキャッチ

### 高い吸収性&優れた通気性の尿とりパッド

**弱酸性素材の表面シート**

素肌と同じ弱酸性素材

繰り返し吸収しても、パッドの表面を素肌と同じ弱酸性に保ちます。

**しっかり立ち上がりソケイ部へフィット!**

強力フィットギャザーでコツいらず! 誰でも簡単にあてやすく横モレを防ぎます。



イメージ図

**あてやすい**

体の中心にあわせやすいセンターライン入り。

**すぐにお肌サラサラ**


すばやく尿を引き込む表面シートが排尿後すぐにパッド表面をサラサラにするので、排尿時の不快感を軽減します。

**逆戻りを防いでべたつかない**


独自の吸収体が尿をしっかり吸収して逆戻りを防ぐので、べたつきを軽減しサラサラ快適が続きます。

**ムレ軽減でお肌にやさしい**

透湿

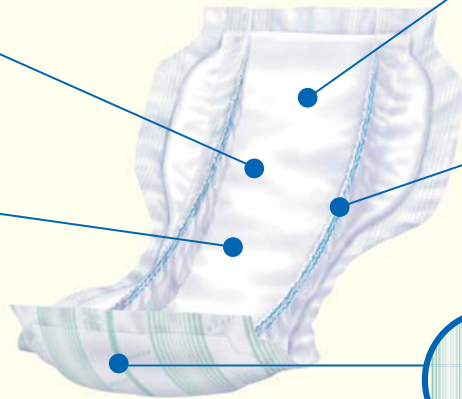

ハイパーキャッチ1600

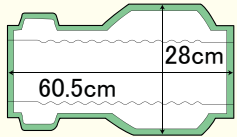


吸収回数目安

1回の排尿量 150ml として 排尿 **9** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです



ハイパーキャッチ2000

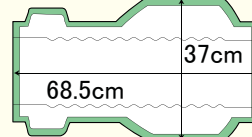

吸収回数目安

1回の排尿量 150ml として 排尿 **10** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです



## イワツキ 安心夜用パッド

### 長時間・夜間使用ができる尿とりパッド

**超吸収ドライマット&スリット加工**

ハイスピード吸収ポリマーとスリット加工により、吸収スピードがさらにUP! 大量の尿を素早く拡散させモラさず吸収し、表面をドライな状態に保ちます。

**お肌にやさしい表面シート**



お肌のカブレを防止する天然植物成分を表面不織布にコート。お肌をやさしく守ります。

**安心のハイ立体ギャザー**

高さ5cmのモレ防止立体ギャザーが横モレを防ぎます。

**ムレ軽減でお肌にやさしい**

透湿

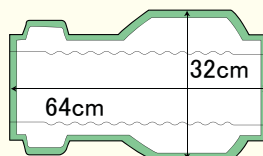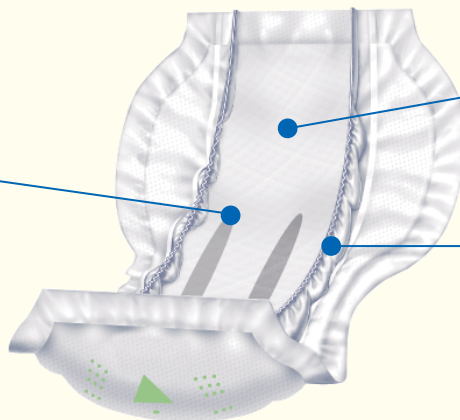

吸収回数目安

1回の排尿量 150ml として 排尿 **8** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです



やさしい目で健康を見つめる...

イワツキ®

## 吸収・拡散パッド価格表

品番	商品名	製品サイズ (cm)	入数	ケース 入数	巾×高×奥行(mm)		参考価格	JANコード
					袋	袋		
					ケース	ケース		
005-50313	ハイパーキャッチ® 1600 病院施設用	28×60.5	30枚	4袋	340×250×185	2,370g	オープン	4971089503132
					515×395×365	10.3kg		
005-50314	ハイパーキャッチ® 2000 病院施設用	37×68.5	20枚	4袋	320×295×215	2,310g	オープン	4971089503149
					625×305×445	10.3kg		
005-50283	安心夜用パッド 病院施設用	32×64	28枚	4袋	420×385×120	2,950g	オープン	4971089502838
					465×405×445	12.9kg		



紙おむつのあて方  
尿モレ防止のワンポイントアドバイス


【ハイドライエース簡単テープ止めタイプ】  
+【イワツキ 吸収・拡散パッド】併用の場合

テープ止めのギャザーはパッドを併用する事を前提として考えられていますので、広く作られています。

立体ギャザーの中に必ずパッドを収めて下さい。



ギャザーは非常に強い撥水をします。ギャザーの立ち具合や重なりが、モレ防止に大きく関係しますので、ギャザーチェックをしてください。

高吸収パッドは大型な物が多いので、パッドの後部がテープ止めの後ろからはみ出さない様に注意して下さい。場合によっては外側に折り返しを行なうと効果的です。

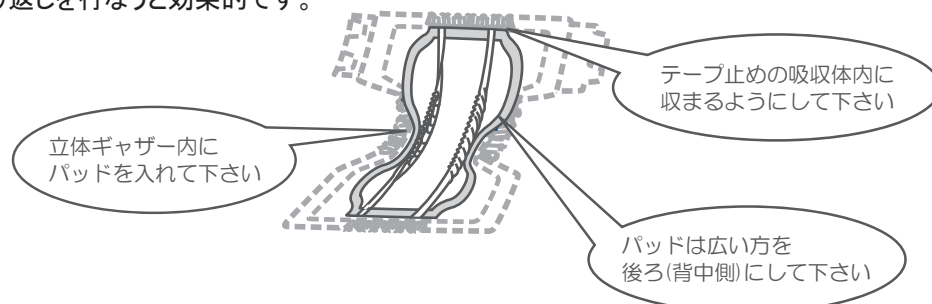

### 『医療費控除制度』活用のおすすめ

- 大人用紙おむつや尿とりパッド類は「医療費控除」の対象品となっています。
- 「医療費控除」申告の必要書類
  - 「おむつ使用証明書」  
おむつを使う方を診ているかかりつけのお医者さんか、病院にご相談のうえ「紙おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
  - 「領収書」  
紙おむつを購入した(日付)(購入金額)(使う方の氏名)(商品名又は大人用紙おむつ)が記入された「領収書」を必ず受け取り、申告の時まで保存しておいて下さい。
- 申告しなければ、税金の還付は受けられません。毎年2～3月の確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収書」を添えて必ず申告しましょう。
- 詳しくは税務署、市区町村におたずね下さい。

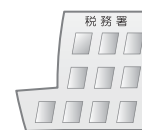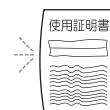

やさしい目で健康を見つめる…

**イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)  
<https://www.iwatsukishop.jp>

