

》医療現場で、さらに使いやすく! ハリクイ® オプション




1.0L用

台座



ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。

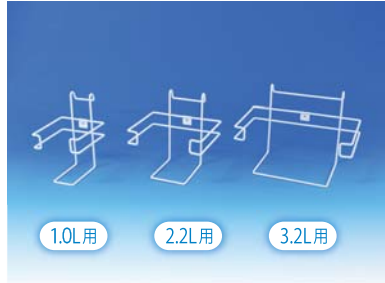

1.0L用


2.2L用

3.2L用

ワイヤーフックホルダー



ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。

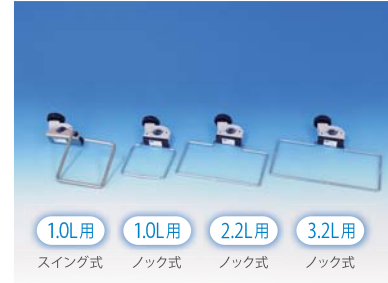

1.0L用

1.0L用

2.2L用

3.2L用

ブラケットホルダー



ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。

》ハリクイ® 規格



品 番	品 名・規 格	ケース入数	J A N コード
004-49158	ハリクイ® 1.0L (針捨てボックス)	50コ	4971089491583
004-42288	ハリクイ® 2.2L (針捨てボックス)	40コ	4971089422884
004-49159	ハリクイ® 3.2L (針捨てボックス)	30コ	4971089491590
004-41505	ハリクイ® 1.0L 台座	—	4971089415053
004-49144	ハリクイ® 1.0L ワイヤーフックホルダー	—	4971089491446
004-42294	ハリクイ® 2.2L ワイヤーフックホルダー	—	4971089422945
004-49147	ハリクイ® 3.2L ワイヤーフックホルダー	—	4971089491477
136-HB25100A	ハリクイ® 1.0L ブラケットホルダー 25mm円柱用 スイング式	—	4560177395072
136-HB25-5	ハリクイ® 1.0L ブラケットホルダー-2 25mm円柱用 ノック式	—	4560177395102
136-8	ハリクイ® 2.2L ブラケットホルダー-2 25mm円柱用 ノック式	—	4560177396444
136-3	ハリクイ® 3.2L ブラケットホルダー-2 25mm円柱用 ノック式	—	4560177395744

- 製品仕様及びデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。
- 変更により、本カタログ掲載の写真と実際の商品が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 本カタログデザインの内容は2024年12月現在のものです。

製造販売元:

イワツキ株式会社

本社:東京都板橋区志村 1-32-18

TEL 03-3966-8371 (代表)

営業所: 仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>

製品及びご注文に関するお問い合わせは、弊社担当営業もしくは上記までお願いいたします。



イワツキSHOP

(オンラインショップ)

<https://www.iwatsukishop.jp>



24.12.1A

針捨てボックス

ハリクイ®

Sharps Quick

使い方
動画はコチラ



組立・最終封のやり方
動画はコチラ



針捨てを簡単・安全に。ペン型注入器用注射針にも対応。



医療現場では鋭利器材廃棄容器や安全装置付器材の導入が進み、リキャップ禁止が浸透してきています。しかし院内清掃業者を含む医療施設で働く全ての方による針刺し切創は、いまだに重要な課題です。ハリクイ®は、コンパクトで使いやすい針捨てボックスです。さまざまな針が廃棄でき、ペン型注入器用注射針にも対応。業務効率化を図るとともに、針刺し切創の防止に貢献します。



1.0L

2.2L

3.2L

やさしい目で健康を見つめる…
イワツキ®


針刺し予防、感染防止、作業効率化… 針捨てのお悩みは、ハリクイ®で解決。

特長

01

さまざまな針が廃棄できる

- 1つの容器でルアースリップタイプ、ルアーロックタイプ、ペン型注入器用注射針などの廃棄が可能。
- 2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。

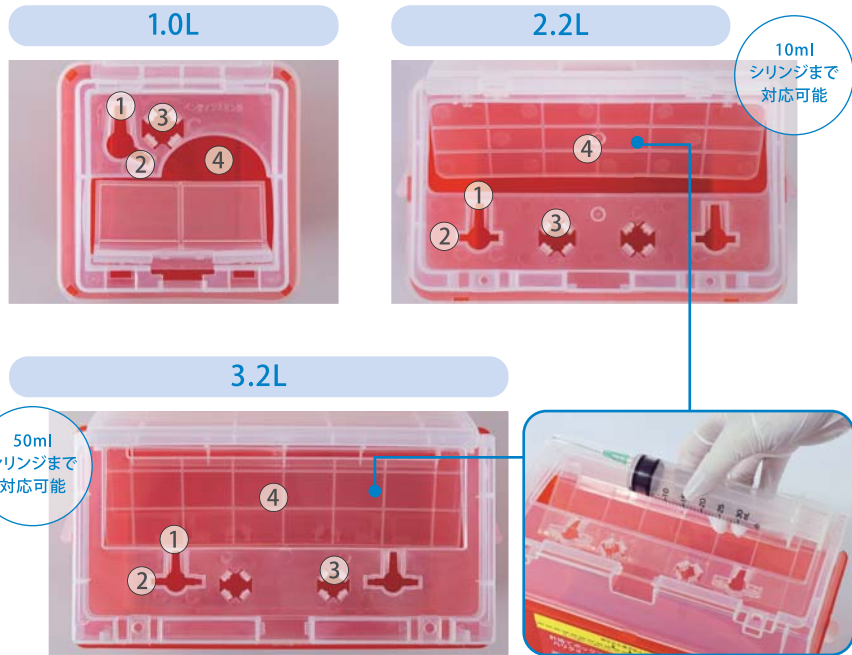

- ① ルアースリップタイプ注射針
② ルアーロックタイプ注射針
③ ペン型注入器用注射針 (インスリン等注入器)
④ その他針 (翼状針、留置針、採血針etc.)

シリンジごと廃棄できます

ペン型注入器用
注射針に
触れる事なく
廃棄可能



片手で簡単に
閉められます

スロープ付で
転倒しても
中身が飛散
しにくい


半透明

特長

02

保管・容器廃棄時の安全対策

- フタは片手で簡単に閉められます。
- 最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。

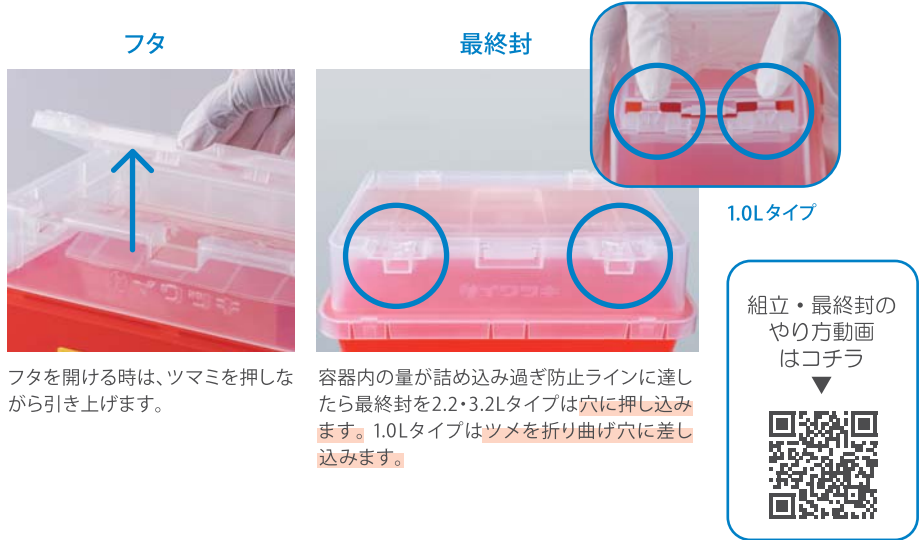


特長

03

血液曝露防止対策

その他の針を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液曝露を防止します。

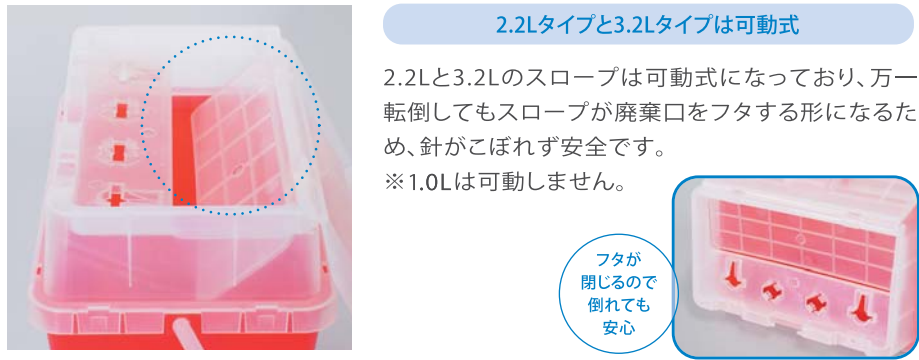


特長


04

詰め込み防止対策


- 容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。
- 詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。

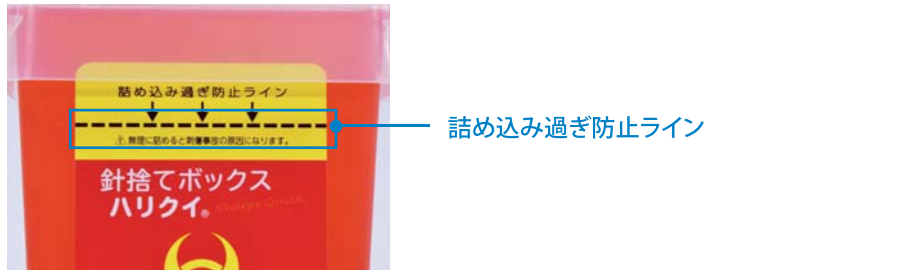

廃棄の仕方

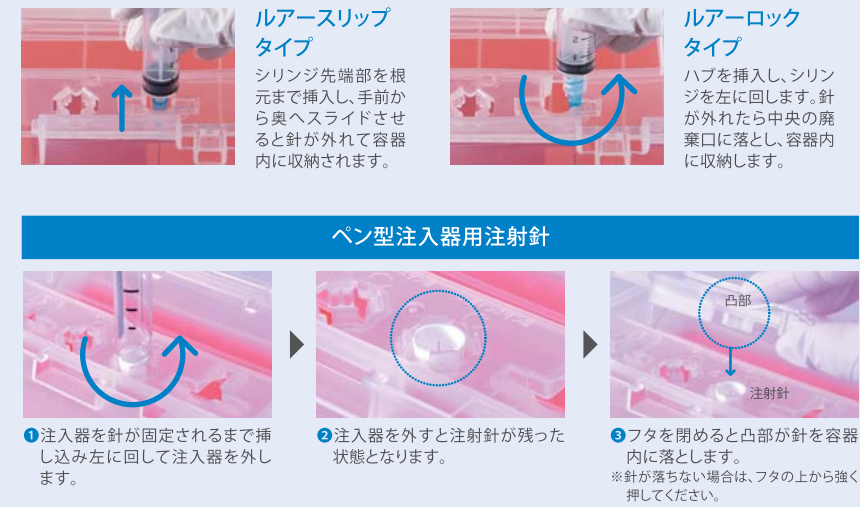

使い方動画
はコチラ

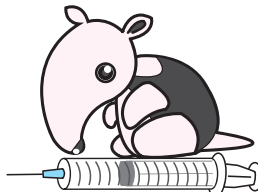

- ポリプロピレン製の耐貫通性容器
- 焼却しても有毒物質は発生しません