



長時間ご使用の方、お肌の弱い方に

夜間の使用や尿量が多い方、お肌の弱い方に



—ワイドロング— 安心形状マット
股下すっきり、おしりゆっつりのマットで、
身体にぴったりフィット！



—ビッグ— ひろびろ設計
おしりを包みこむひろびろ設計で、
長時間装着する方や尿量の多い方でも安心！

しっかり立ち上がり
ソケイ部へフィット！

強力フィットギャザーでコツいらず！
誰でも簡単にあてやすく
横モレを防ぎます。



イメージ図


素肌と同じ
弱酸性素材

弱酸性素材の表面シート

繰り返し吸収しても、パッドの表面を素肌と
同じ弱酸性に保ちます。

拡散スリット

尿を前後に拡散し、あふれモレを防ぎ
ます。

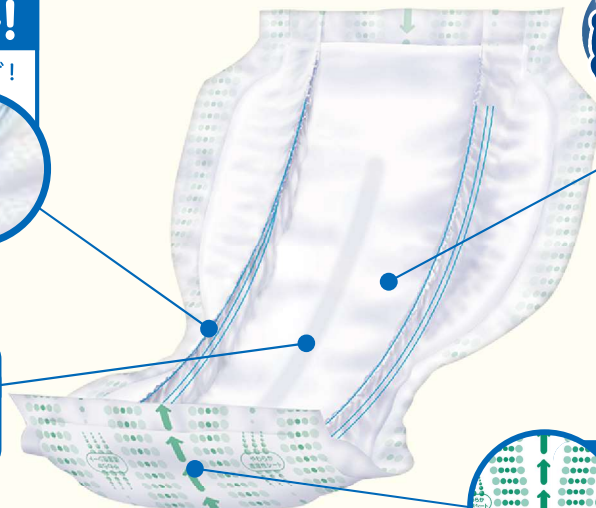

ビッグ

体の中心にあわせやすく
パッドの向きがわかりやすい
センターライン

ムレ軽減


透湿

透湿性シートがおむつ内の湿気を
逃し、ムレを防ぎます。




<通気性実験写真>

ワイドロング

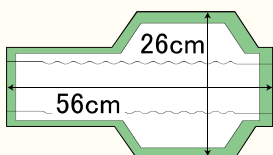

ビッグ

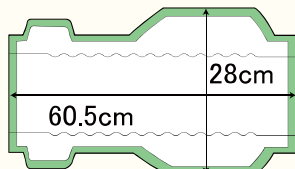

吸収回数目安
1回の排尿量
150ml
として 排尿 **4** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです

吸収回数目安
1回の排尿量
150ml
として 排尿 **6** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです

透湿尿とりパッド価格表

品番	商品名	製品サイズ (cm)	入数	ケース 入数	巾×高×奥行(mm)	重量	参考価格	JANコード
					袋	袋		
					ケース	ケース		
005-50319	透湿尿とりパッド ワイドロング 病院施設用	26×56	30枚	8袋	225×315×165	1,420g	オープン	4971089503194
					690×455×350	12.8kg		
005-50311	透湿尿とりパッド ビッグ 病院施設用	28×60.5	30枚	4袋	340×250×185	1,890g	オープン	4971089503118
					515×395×365	8.4kg		



紙おむつのあて方 尿モレ防止のワンポイントアドバイス

【ハイドライエース簡単テープ止めタイプ】
+【イワツキ透湿尿とりパッド】併用の場合


テープ止めのギャザーはパッドを併用する事を前提として考えられていますので、広く作られています。

立体ギャザーの中に必ずパッドを収めて下さい。

ギャザーは非常に強い撥水をするので、重なったりしているとモレの原因になります。

高吸収パッドは大型な物が多いので、パッドの後部がテープ止めの後ろからはみ出さない様に注意して下さい。

場合によっては外側に折り返しを行なうと効果的です。

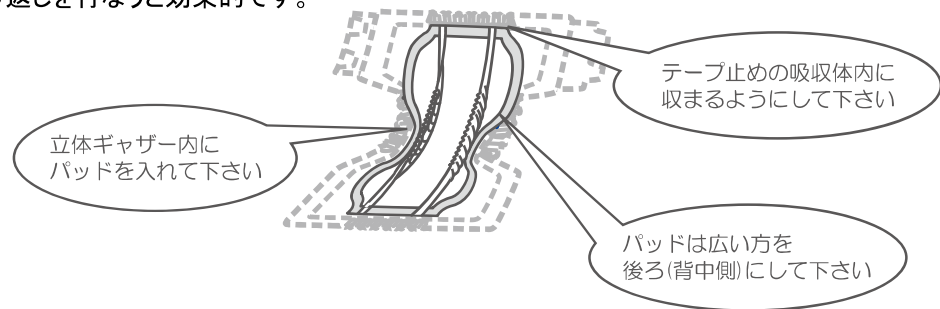

『医療費控除制度』活用のおすすめ

- 1) 大人用紙おむつや尿とりパッド類は「医療費控除」の対象品となっています。
- 2) 「医療費控除」申告の必要書類
 - イ) 「おむつ使用証明書」
おむつを使う方を診ているかかりつけのお医者さんか、病院にご相談のうえ「紙おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
 - ロ) 「領収書」
紙おむつを購入した(日付)(購入金額)(使う方の氏名)(商品名又は大人用紙おむつ)が記入された「領収書」を必ず受け取り、申告の時まで保存しておいて下さい。
- 3) 申告しなければ、税金の還付は受けられません。毎年2～3月の確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収書」を添えて必ず申告しましょう。
- 4) 詳しくは税務署、市区町村におたずね下さい。



やさしい目で健康を見つめる…
イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp>

