



嘔吐物処理セット

救急用品



嘔吐物処理セットとは？

風邪やノロウイルスなど、嘔吐物はさまざまな病原体に汚染されていると考えられます。「嘔吐物処理セット」は個人防護具と汚物処理用品に加え「抗菌消臭剤(SS-P3EX)」の抗菌消臭効果で緊急時でも二次感染を予防し、安全に嘔吐物が処理できます。



セット内容

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
- 抗菌消臭剤(250ml)・・・ 1本
 - 凝固剤(10g)・・・ 3袋
 - 使い捨て長袖エプロン・・・ 1枚
 - 使い捨て医療マスク・・・ 1枚
 - 使い捨て手袋M・L・・・ 各1双
 - シューズカバー・・・ 1足
 - ペーパータオル・・・ 10枚
 - ポリ袋・・・ 2枚

【安全性】

複数の抗菌性アミノペプチドが主成分の抗菌消臭剤(SS-P3EX)が、ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)やO-157を含む大腸菌等の不活化に効果があります。塩素臭や肌荒れ、色素脱色、金属腐食がないので、いつでも・どこでもご使用できます。

菌名	試験開始時	経過時間	結果
ネコカリシウイルス ※ノロウイルス代替	log TCID ₅₀ /ml 7.0	5分後	<3.5(検出せず)
O-157	3.1 × 10 ⁶	1分後	検出せず
大腸菌	2.7 × 10 ⁶	1分後	検出せず
MRSA	2.1 × 10 ⁶	1分後	検出せず

【充実した防護用品】

嘔吐物は想像以上に遠くまで飛散しています。医療材料メーカーならではの充実した個人防護具で、処理する方を汚染のリスクから守ります。

【スピーディな処理】

ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、嘔吐物等の処理は乾燥しないうちに迅速に行うことが重要です(厚生労働省)。嘔吐物処理セットはすべての道具がセットになっているので、処理への対応が素早く行えます。処理の手順も写真入説明書が入っているので、わかりやすくなっています。

品番	品名・規格	参考価格	ケース入数	JANコード
007-70096	嘔吐物処理セット	オープン	4箱	4971089700968
120-98027	SS-P3EX(抗菌消臭剤) 4L	オープン	3コ	4560169980279
120-009	SS-P3EX(抗菌消臭剤) 18L 業務用	オープン	1コ	4560169980286
120-98035	凝固剤 10g × 20袋	オープン	25コ	4560169980354

※凝固剤は出荷単位がケースになります。 ※製品仕様及びデザインは、改良などのため予告なく変更することがあります。



本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<https://www.iwatsuki.co.jp>

イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp>



嘔吐物 処理セット

セット内容

- ◆ 抗菌消臭剤 (250ml)
- ◆ 使い捨て長袖エプロン (1枚)
- ◆ 使い捨て医療用マスク (1枚)
- ◆ ペーパータオル (10枚)
- ◆ 凝固剤 (10g × 3袋)
- ◆ 使い捨て手袋 (M・L各1双)
- ◆ シューズカバー (1足)
- ◆ ポリ袋 (2枚)

- 嘔吐物以外に、下痢など糞便の処理にもご使用できます。
- ご使用前に必ず使用手順をよく読んで正しくお使いください。
- 処理終了後は、すべての内容品(抗菌消臭剤など)を廃棄してください。

使用手順



① 作業前にエプロン、手袋、シューズカバーを装着してください。

※窓を開けるなど換気も行いましょう。

② ポリ袋の口を2枚とも広げて近くに置いてください。また嘔吐物を回収する際に使う‘ヘラ’‘チリ取り’を箱から切り取ってください。抗菌消臭剤のふたも開けておきます。



※養生テープなどで広めに目印をつけると周囲への警戒のアピールにもなります。

③ 嘔吐物に凝固剤をまんべんなく振りかけ固めます。凝固剤は3袋入っていますので、嘔吐物の量に応じて使用量を調整してください。



④ 嘔吐物の水気がなくなり、完全に固まるまで待ちます。




⑤ 固まった嘔吐物は、ヘラとチリ取りを使い外側から内側に向けてゆっくり回収します。回収した嘔吐物はポリ袋の縁に付かないよう、中央に入れてください。



⑥ 使用したヘラとチリ取りをポリ袋に入れます。ポリ袋の口をしっかり結び、もう一つのポリ袋に入れます。



⑦ 嘔吐物が付着していた床とその周辺をペーパータオルで覆い、ペーパー全体が濡れるくらい抗菌消臭剤をゆっくりとまんべんなく回しかけます。※ボトル1/3程度が目安

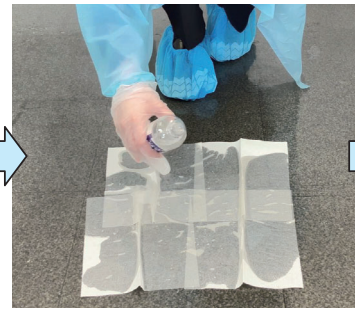

⑧ 約5分間浸した後、床に残った嘔吐物をペーパータオルで拭き取り、ポリ袋に入れてください。



⑨ 嘔吐物のあった場所から半径1mほどの範囲で抗菌消臭剤をゆっくりと回しかけます。抗菌消臭剤が乾くまで(床と養生テープは)そのままにしてください。



⑩ 処理後は、箱を潰してポリ袋に入れます。使用していたシューズカバー⇒手袋⇒エプロン⇒マスクの順番に外して、ポリ袋に入れます。



⑪ 防護具を外したら、廃棄物の入ったポリ袋の上から抗菌消臭剤を回しかけます。使用した抗菌消臭剤をポリ袋に入れて、袋をしっかり結んでください。



⑫ 全ての処理が終わりましたら、石鹸などで手をしっかり洗ってください。※十分に換気を行うことが感染防止には重要です。

