

医 04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## メディカルドレープ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

不織布及び不織布 - ポリエチレンフィルムの貼り合せ品サイズ  
(60cm×60cm、200cm×300cm 等) 及び穴ずれ防止の粘着テープ貼り合せによって種類は異なる。

#### 【使用目的又は効果】

手術時に手術部周辺を覆う不織布製品で手術部を清潔に保つ為に使用される。

#### 【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であり、再使用はできない。

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないことを確認する。
- 2) 滅菌包装を開封し、無菌的に取り出す。
- 3) 消毒した手術部周辺を覆う。

#### 【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないことを確認する。
- 2) 損傷や水濡れがあれば使用しないこと。
- 3) 欠陥を発見した折には使用しないこと。
- 4) 包装開封後は直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1) 保管方法

- ・直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等を避けて安定した状態で保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

##### 2) 有効期間

- ・包装に表示している使用期限欄を参照のこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先：TEL06-7711-6060

#### [発売元]

イワツキ株式会社

東京都板橋区志村1丁目32番18号

問い合わせ先：TEL03-3966-8371