

医療現場の方の安全・安心のために...

医療機器

一般名称	X線造影剤入りガーゼ
販売名	滅菌テラトラストX-N
届出番号	13B3X00207000034

X線造影剤入りガーゼ

カウントレー® ガーゼ X

滅菌済

手術(前・後)の使用ガーゼの枚数の不一致が不安



カウントレーガーゼが解決します!

特長

【目視で簡単カウント】

使用前：術前にトレーを開封した瞬間、「パツと見」でカウント完了。

使用后：トレーに納めるだけで、ガーゼ枚数(10枚)を確認できます。

【さばきやすい特殊折】

ガーゼを引き出すことで縦方向にさばけます。横方向にもさばきやすい特殊折です。

【血液量も簡単測定】

アウタートレーに血液が溜まるので、トレーごと簡単に計量ができます。

1つのトレーで簡単管理!
カウントの手間を軽減します!



品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
002-21373	滅菌カウントレー®ガーゼX-N 黒 特殊折 10枚 1組 12P	オープン	4箱	4971089213734

イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<http://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<http://www.iwatsukishop.jp/>



※写真は一例です。

前カウント



① 滅菌バッグを開封し、清潔野でフタシールを剥がします。



② トレーの各部屋にガーゼが1枚ずつ入っています。術前に目でガーゼの枚数(10枚)を確認できます。



③ インナートレーを取り出します。ガーゼが出ている方を上にしてアウトートレーにセットします。



④ トレーを押さえ、上方にガーゼを引き抜きます。(縦方向にさばけます。)



⑤ 取り出したガーゼの端を掴んでさばきます。(横方向にさばけます。)

後カウント



① アウトートレーにインナートレーをセットします。使用後のガーゼをインナートレーの各部屋に納めます。



② 各部屋にはガーゼが1枚しか入らないようになっています。術後も簡単にガーゼのカウントができます。



③ インナートレーに納まったガーゼの血液は、各部屋の底穴から流れ、アウトートレーに溜まります。



④ トレーごと重さを量ります。カウントレガーゼの重さを事前に引いておくことで、一目で血液量が測定できます。



⑤ ガーゼを入れたままトレーを積み重ねることができます。

やさしい目で健康を見つける...